



Kegel Rejuve

Ваш персональный тренер
для эффективных тренировок по Кегелю


Руководство пользователя

Arabin24.ru
Repro21.ru
Smartkegelball.ru





Комплектация

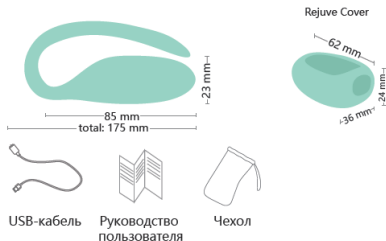

Технические характеристики

Материал: медицинский силикон/ABS | Вес: 27 г | Цвет: светло-зелёный
 Аккумулятор: Li-Ion 200 mAh | Зарядное напряжение: 300 мА
 Время зарядки: 90 минут | Рабочее время: 150 минут

US Patent: D760,898 S CN Patent: ZL 2014 1 0751835.0

Производитель: VTrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Rm 508, 1888 Yishan Rd., Shanghai, China

+86 21 64052517

vtrump.com

Первое использование

Шаг 1: скачайте приложение

1. Найдите приложение Magic Kegel в AppStore или Play Market.
2. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.
3. Зайдите на сайт smartkegelball.ru и скачайте на нём приложение.



Шаг 2: запустите приложение и подключите устройство к смартфону


Включите свой Kegel Rejuve.



Следуйте инструкциям в приложении для установления соединения.



В приложении появится оповещение о соединении, когда тренажёр подключится к смартфону.

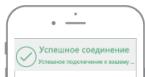

Шаг 3: приступите к занятиям

Примите комфортное положение для введения тренажёра: лёжа на спине с ногами, согнутыми в коленях, либо стоя с одной ногой, поднятой на 90°, как при введении гигиенического тампона. Шнур-антенна при этом должен лежать в области клитора в направлении уретры. Для облегчения введения, возможно, потребуется использовать лубрикант на водной основе. Также можно надеть при необходимости на устройство презерватив и нанести лубрикант на его поверхность.



Подсказка: при установке шнур-антенна должна оставаться снаружи половых органов в месте сгиба, чтобы сигнал был хорошим.

Шаг 4: завершение тренировки

Для выключения питания прибора зажмите кнопку питания на 3 секунды. Светодиодный индикатор выключится, когда устройство будет полностью отключено. После полного отключения устройства необходимо его очистить и убрать на хранение (см. раздел «Уход и хранение»).



Подсказка: Kegel Rejuve, выключится самостоятельно через 5 минут после выхода из приложения или отключения тренажёра Kegel Rejuve от него.

Зарядка устройства

После подключения кабеля с тренажёром к источнику питания загорится светодиодный индикатор. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор погаснет. При первом применении сначала полностью разрядите тренажёр до выключения, а после проведите его полную зарядку.



Выявление неисправностей

Если Ваш Kegel Rejuve не работает:

- при работе в автономном режиме, включите тренажёр, нажмите на сенсорные датчики. Если нет виброответа - проверьте заряд аккумулятора;
- при работе через приложение (не удаётся подключить тренажёр к мобильному устройству), проверьте заряд аккумулятора тренажёра и мобильного устройства.

Уход

Тренажёр необходимо после каждого использования обрабатывать очистителем для силиконовых тренажёров или тёплой водой с средством для интимной гигиены/антибактериального мыла. Перед использованием/ хранением устройство необходимо полностью просушить.

Хранение

Для хранения используйте сумочку-чехол. Хранение без неё может вызвать повреждение тренажёра. Необходимо хранить устройство в прохладном вентилируемом месте, избегая воздействия солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

Особые указания

Предназначено для лиц старше 18 лет. При возникновении дискомфорта во время тренировки необходимо прекратить использование. Не применять на раздражённой или повреждённой коже. Перед применением снимите пирсинг и иные украшения половых органов. Не продолжать тренировку в случае перегрева или сильного нагрева тренажёра.

Автономный режим тренировки

Тренажёр можно использовать без смартфона: сжатие мышц тазового дна вокруг тренажёра передаёт импульс через датчики давления и тренажёр будет вибрировать, усиливая эффект от сокращения. См. изображение. Сила и продолжительность виброответа тренажёра зависит от силы и длительности его сжатия мышцами тазового дна. Использование тренажёра возможно не только в положении лёжа, но и стоя. Рекомендуется попробовать оба положения тела для тренировки, чтобы определить оптимальный и наиболее эффективный для Вас.



Rejuve Cover

В комплекте к тренажёру Вы найдете дополнительную силиконовую насадку, которая надевается на устройство (см. изображение) с целью увеличения объёма головки. Мы рекомендуем пробовать выполнить упражнения без Rejuve Cover и с её применением, чтобы определить наиболее подходящий вариант. Применение Rejuve Cover не снижает чувствительность сенсорных датчиков.



Гарантийные условия

Гарантия производителя – 1 (один) год после даты приобретения.

Гарантийный срок распространяется на качество сборки и используемые материалы, подвижные части изделия, обеспечивающие нормальную работу устройства.

Гарантия не покрывает случаи естественного износа, поломки ввиду не соблюдения правил эксплуатации (см. раздел "Уход и хранение"), намеренной порчи устройства.

При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу.

Не пытайтесь вскрывать устройство самостоятельно - это аннулирует гарантию.

Сервисная карточка

Информация о пользователе

Имя

Телефон

Адрес

Причина возврата

Информация о продавце

Название компании

Телефон

Challenge Your Fantasy
Бросает вызов Вашей фантазии



**Официальный дистрибьютор
на территории РФ:**

ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА"
129110, Москва, Проспект Мира, 68, стр.2
+7 (495) 788-77-46
pentcroft@mail.ru
Arabin24.ru
Repro21.ru
Smartkegelball.ru

